




REXTON
APP GUIDE

REXTON

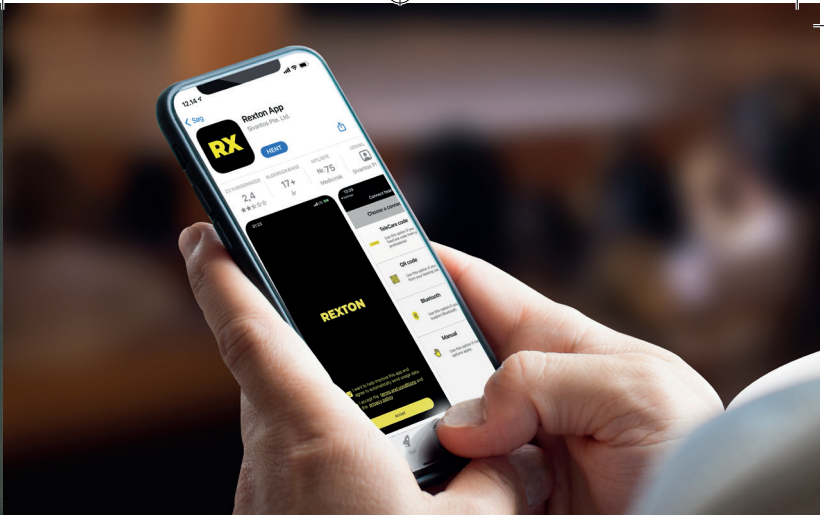



FØR VI GÅR I GANG ...


Rexton App er en fjernbetjening til dine høreapparater, hvor du diskret kan justere på lydstyrken, skifte lytteprogram og betjene andre funktioner. Alt hvad du skal bruge er din smartphone.

Denne guide fokuserer på Bluetooth®-opkobling mellem høreapparater og smartphone.

Rexton App kan bruges med alle Apple-enheder med iOS-version 11 eller højere, og de fleste Android-enheder med Android 8 eller højere. Du kan downloade Rexton App gratis fra App Store og Google Play Store.


Søgeord: **Rexton App**



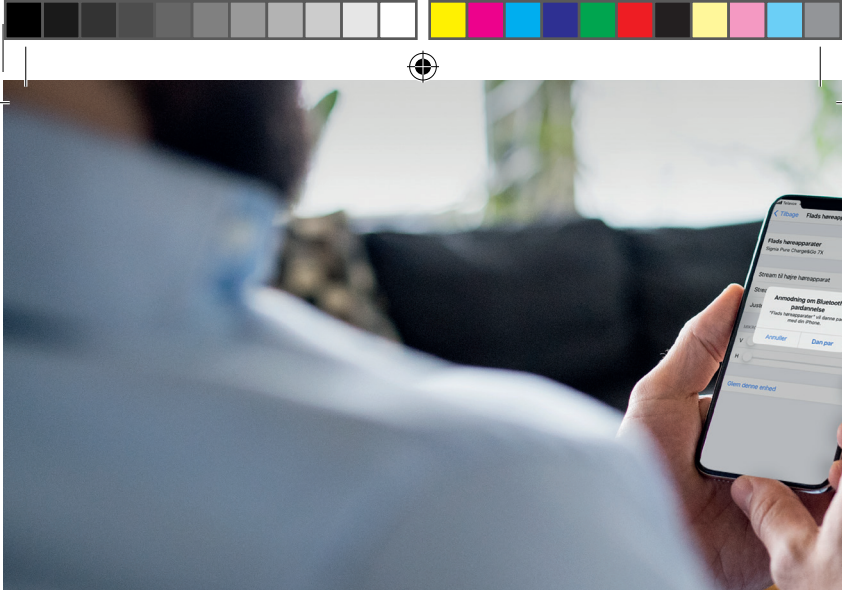

PARRING AF REXTON HØREAPPARATER MED DIN SMARTPHONE TIL DIRECT STREAMING



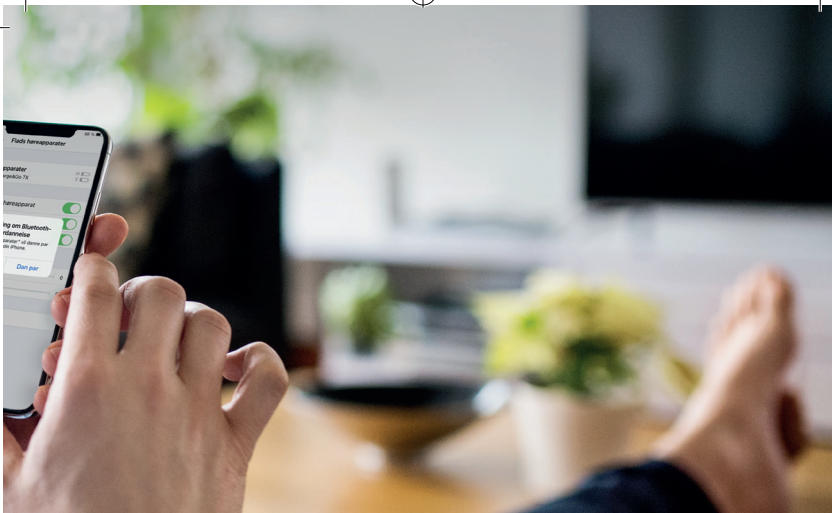

Apple iOS


- 1: **VIGTIGT:** Sluk høreapparaterne og tænd dem igen.
- 2: Gå til Indstillinger og aktiver Bluetooth®.
- 3: Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Høreapparater.
- 4: Vælg dine høreapparater under MFI-høreapparater, og tryk "Dan par" for hvert høreapparat.
- 5: Høreapparaterne er nu parret med din smartphone og klar til at streame musik og opkald.
- 6: Åbn appen for at tilslutte dine høreapparater til den og følg anvisningerne. Vælg "Bluetooth" når appen spørger hvordan forbindelse skal opnås.

Android

- 1: **VIGTIGT:** Sluk høreapparaterne og tænd dem igen.
- 2: Åbn appen for at tilslutte dine høreapparater til den og følg anvisningerne. Vælg "Bluetooth" når appen spørger hvordan forbindelse skal opnås.



REXTON APP: HOVEDSKÆRM

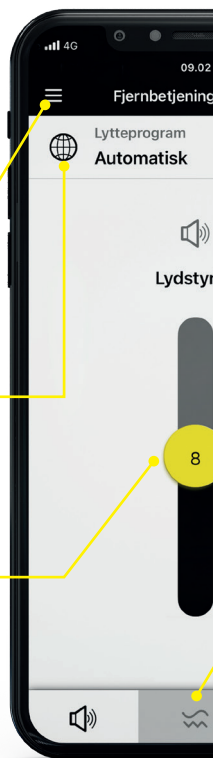

Menu

(vælges f.eks
hvis appen skal
opsættes påny)

Skift mellem lytteprogrammer

(funktion og antal af
lytteprogrammer
laves af hørelinikken)

Lydstyrkekontrol

(Lydstyrke op/ned)




Batteristatus

Status for Bluetooth®-forbindelse

Sound Balance
(Justering af bas/diskant)

Retningsbestemt hørelse
(se side 8)

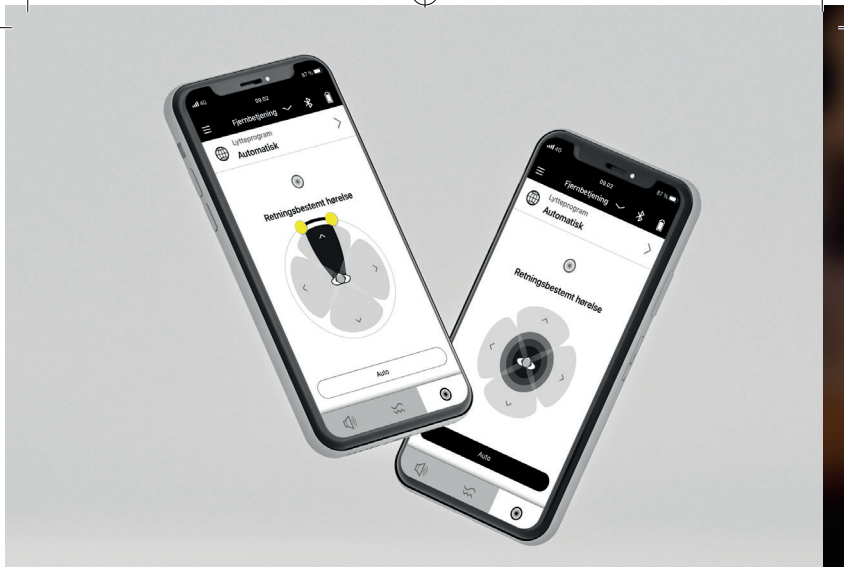

RETNINGSBESTEMT HØRELSE


Retningsbestemt høreelse lader dig bestemme hvilken retning du hører bedst fra.


"Auto" er standard dvs. høreapparaterne selv bestemmer. Som udgangspunkt anbefales "Auto".

Det sorte område er den retning, hvor man hører bedst. Det er muligt at fokusere til højre, venstre, forfra (vist) og bagfra.

Dette kan anvendes f.eks når der er flere personer samlet og det bliver svært at følge samtalen.

Retningsbestemt høreelse er ikke tilgængelig i alle produkttrin. Din høreklunik kan fortælle dig hvilket produkttrin du har.

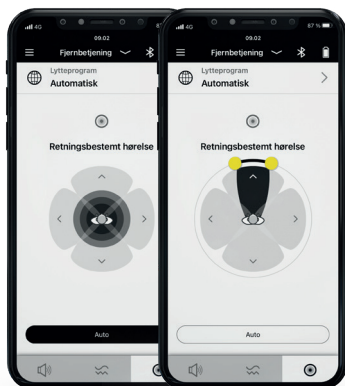

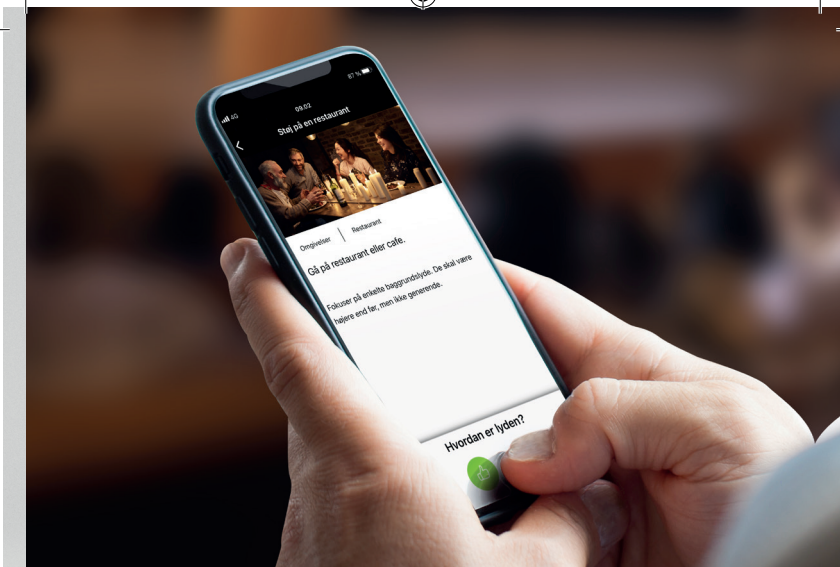

LYTTEØVELSER

Det kan være svært at vænne sig til lyden i høreapparater. Brug "Lyttøvelser" som inspiration til at afprøve apparaterne i forskellig hverdagsituationer.

Gå til Menu (se side 6)
> Lyttøvelser.






OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL


Hvad er direct streaming?

Direct streaming er muligheden for at sende lyd (telefonopkald, musik m.m.) direkte fra din smartphone op til høreapparaterne uden behov for ekstraudstyr. Direct streaming til Rexton høreapparater er lige nu kun muligt med iOS.

Skal jeg bruge Rexton App for at kunne streame direkte?



Nej, Rexton App har intet med direct streaming at gøre og skal ses udelukkende som en mulighed for at betjene høreapparaternes øvrige funktioner. Det er således muligt med iOS-enheder at sende lyd fra smartphone til høreapparaterne helt uden at have Rexton App installeret.



Kan jeg have flere smartphones parret op til mine høreapparater?

Af hensyn til stabilitet frarådes det at have flere enheder parret til høreapparaterne.



OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvordan slukker jeg for høreapparaternes Bluetooth® i forbindelse med flyrejse?

Sæt din smartphone i flyvesikret tilstand og genstart derefter høreapparaterne. Da apparaterne ikke kan finde din smartphone vil de automatisk slukke for deres Bluetooth®. Når din smartphone er i flysikret tilstand anvender appen højfrekvente toner, som sendes fra din smartphone til høreapparaterne. Du kan derfor stadig betjene enkelte funktioner i Rexton App under flyrejser.

Når du har forladt flyet kan du tage din smartphone ud af flysikret tilstand og genstarte dine høreapparater. Herefter fungerer de som normalt.

Visse Android-enheder har lydeffekter således, at musik og anden lyd, der bliver afspillet via enhedens højttaler, får mere fylde og rumklang. Disse effekter skal deaktiveres, for at Rexton App kan fungere i flytilstand.







FEJLFINDING

Der er problemer med streaming (iOS), mistet bluetooth-forbindelse, periodiske fejl eller parring med appen/appen virker ustabil:

Genstart din smartphone: En daglig genstart sikrer, at din smartphone fungerer optimalt. Bemærk at smartphone skal slukkes helt og tændes igen. Det er ikke nok at lukke alle apps ned. Det kan nogen gang hjælpe blot at slukke og tænde for telefonens Bluetooth® men en total genstart er mere effektivt.

Kontroller at batterierne er opladet eller nye. Lavt strømniveau i høreapparaterne kan godt gøre forbindelsen til din smartphone ustabil.





FEJLFINDING

Et eller begge høreapparater har været til service og nu vil apparaterne ikke forbinde til telefonen/appen, lyd fra streaming kommer kun frem til et apparat og/eller forbindelse virker ustabil:

iOS



- 1:** Sluk begge høreapparater og luk Rexton App.
- 2:** Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Høreapparater > MFI-Høreapparater, vælg dine høreapparater og tryk på "Glem denne enhed".
- 3:** Vigtigt: Sluk for din smartphone, vent 10 sekunder og start den op igen.
- 4:** Tænd for dine høreapparater.
- 5:** Følg instrukserne for parring til iOS på side 5.
- 6:** Åbn Rexton App.
Tryk på Menu (se hovedskærm side 6-7)
Gå til App indstillinger > Opsætning af appen > Bluetooth® og følg anvisningerne.
- 7:** Hvis dette ikke løser problemet skal begge dine apparater genprogrammeres. Dette kan kun gøres af høreklubben/høreinstitutet der sidst har programmeret apparaterne.



FEJLFINDING

Et eller begge høreapparater har været til service og nu vil apparaterne ikke forbinde til telefonen/appen, lyd fra streaming kommer kun frem til et apparat og/eller forbindelse virker ustabil:

Android

- 1:** Sluk begge høreapparater og luk Rexton App
 - 2:** Gå til Indstillinger > Bluetooth® og find dine høreapparater under parrede enheder
 - 3:** Slet apparaterne fra telefonen
 - 4:** Vigtigt: Sluk for din Android-telefon, vent 10 sekunder og start den op igen
 - 5:** Tænd for dine høreapparater
 - 6:** Åbn Rexton App. Tryk på Menu (se hovedskærm side 6-7) Gå til App indstillinger > Opsætning af appen > Bluetooth® og følg anvisningerne
 - 7:** Hvis dette ikke løser problemet skal begge dine apparater genprogrammeres. Dette kan kun gøres af høreklubben/høreinstituttet der sidst har programmeret apparaterne
- 
- 



REXTON HØREAPPARATER

Din forhandler:

Din kontakt i Danmark

Signia Høreapparater A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyng
Telefon 63 15 40 00

Juridisk producent

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyng
Danmark

www.rexton.dk

Signia Høreapparater sælger i Danmark høreapparater med varemærkerne Signia og Rexton.

Oplysningerne i dette dokument er generelle beskrivelser af de tekniske muligheder, der findes, men som ikke nødvendigvis er relevante for den enkelte, og de kan ændres uden forudgående varsel.

Bluetooth® mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af WSAUD A/S sker i henhold til en licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

cli444/1/0721 | © 2021 WSAUD A/S