

## Guía de inicio rápido


# TV Sound

Audio de alta calidad transmitido directamente a tus audífonos Rexton con Bluetooth®



### Cómo encender el TV Sound


1. Coge el cable Micro USB que viene con tu TV Sound
2. Conecta el Micro USB al dispositivo TV Sound
3. Conecta el Micro USB al televisor a través de la toma USB del televisor. Si el televisor no tiene conexión USB, el TV Sound deberá conectarse a una fuente de alimentación externa o al equivalente al cargador de un teléfono
4. El televisor debe estar encendido

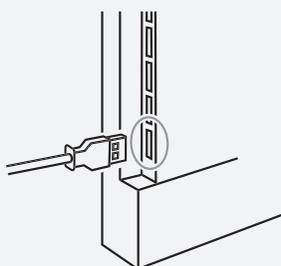

### Conexión de la entrada de audio


#### Mediante cable analógico

1. Conecta el televisor TV Sound a la red eléctrica
2. Conecta el cable analógico a la parte posterior del televisor (entrada púrpura)
3. Conecta el otro extremo del cable analógico en las tomas correspondientes del televisor
4. Enciende el televisor para iniciar el audio

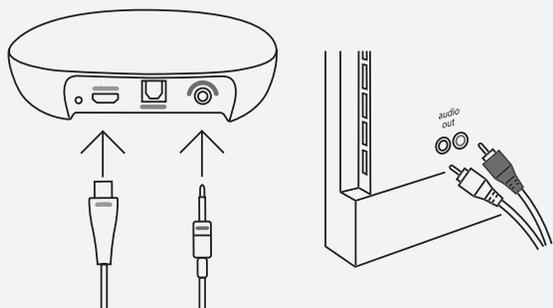

#### Mediante cable óptico

1. Conecta el televisor TV Sound a la red eléctrica
2. Conecta el cable óptico a la parte posterior del TV Sound (entrada azul)
3. Conecta el otro extremo del cable óptico a la toma «Optical OUT» del televisor
4. Enciende el televisor para iniciar el audio

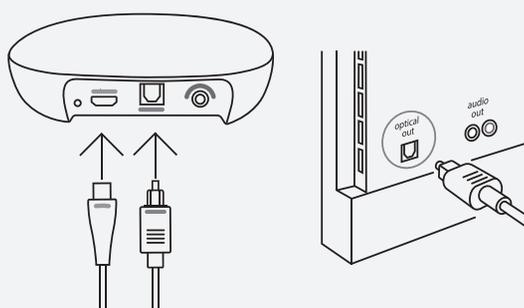

## Guía de inicio rápido

# TV Sound

### Emparejar los audífonos con TV Sound

1. Enciende el TV Sound
2. Reinicia los audífonos
3. Coloca los audífonos en el rango de emparejamiento (de 0 a 20 cm)

- El LED parpadea en azul durante el emparejamiento
- El LED se ilumina en azul fijo tras el emparejamiento

El TV Sound puede transmitir a varias parejas de audífonos emparejados. Para emparejar varios audífonos es necesario repetir el proceso de emparejamiento

CONSEJO: Si los audífonos ya están emparejados con otro dispositivo (como un teléfono), asegúrate de que no está cerca o apaga el Bluetooth® durante el emparejamiento de TV Sound



### Empieza a transmitir con Rexton App

Paso 1:

- Abre Rexton App
- Pulsa "Transmisión" en la parte inferior del menú



Paso 2:

- Pulsa "Reproducir" para iniciar la transmisión de audio del televisor



Paso 3:

- Ajusta el volumen si lo deseas
- Pulsa "Pausar" para detener la transmisión

